



## Verfügbare Gebindeformen



Kanister, 5 l  
Art-Nr.: 38302008



Sprühflasche,  
1000 ml  
Art-Nr.: 38302011

alkohol- & aldehydfrei, pH-neutral, kompatibel mit empfindlichen Oberflächen wie Acrylglas, Linoleum, PVC und anodisiertem Aluminium. Hinterlässt keine Rückstände auf Oberflächen, VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.)-konform. Effektiv gegen ausgewählte Viren, wie z. B. Norovirus und Influenza A (H1N1). Breitbandaktiv gegen grampositive und gramnegative Organismen. Wirksam gegen alle behüllten Viren wie Grippeviren, Vakziniaviren, Rotaviren, Noroviren (MNV), COVID-19, HBV, HIV, HCV (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV Leitlinie). Begrenzt bakterizide Wirkung.

## Technische Daten

- PH-Wert: ca. 7,0
- Farbe: farblos
- Geruch: Citrusduft
- Inhaltsstoffe: In 100 g sind enthalten: 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,25 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, C12-14- I kyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-, Chloride Enthält: kationische Tenside <5%, Duftstoffe (LIMONENE)
- Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Anwendung/Dosierung



Groben Schmutz vorab von der Oberfläche entfernen. Septaprotect alkoholfrei gleichmäßig auf die Oberfläche applizieren und 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend ggf. mit einem Tuch nachreiben.



Stand: 09.12.2021

MADE IN GERMANY 